

P007001 63101/DP-dd de/5/01/01 Technische změny vyhrazeny



Dürr Dental doporučuje\* Orotol® plus, Orotol® ultra a MD 555 cleaner pro údržbu vašeho odsávacího zařízení! Pouze tyto produkty byly otestovány společností Dürr Dental.



### Důležité!

Použitím nesprávných prostředků může docházet k poruchám přístroje nebo k poškození. Tím může dojít k zániku nároků na uplatnění záruky.

- Nepoužívejte pěnící prostředky
- Nepoužívejte abrazivní prostředky
- Nepoužívejte prostředky obsahující chlor
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako např. aceton

\*Předpokladem je schválení výrobců v zemi určení

Návod k údržbě odsávání s přípravky Orotol® plus a MD 555 cleaner

# Každodenní dezinfekce pomocí přípravku Orotol® plus

S tekutým koncentrátem Orotol® plus máte ideální řešení pro současnou dezinfekci, dezodorizaci, čištění a údržbu všech odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. Aplikace se provádí po ukončení ošetření, při vyšším zatížení 2x denně (v poledne a večer).

Dezinfekce

## 1 Předběžné čištění




Odsajte 2 litry vody

## 2 Dávkování 2%



Příprava 2% roztoku: 1 litr vody + 20 ml přípravku Orotol plus

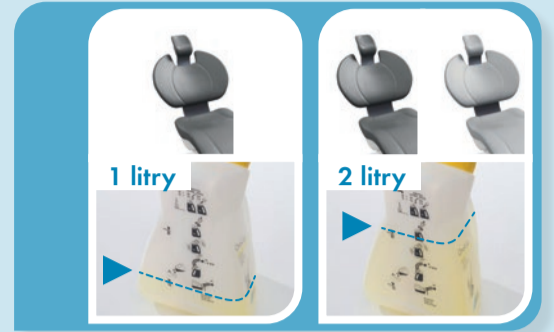

**Na zubní soupravu:**  
1 litr vody + 1 uzávěr přípravku (po rysku) Orotol® plus (20 ml)  
**Při 2 zubních soupravách:**  
2 litry vody + 2 uzávěry (po rysku) přípravku Orotol® plus (40 ml)

## 3 Odsávání



Nasaďte odsávací hadice, odsajte 1 litr roztoku na zubní soupravu

## 4 Dezinfekce plivátka



Minimálně 250 ml roztoku na plivátko

## 5 Doba působení



Min. 1 hodinu nechejte působit. Spektrum účinků: baktericidní, levurocidní, omezeně virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené adenoviry a noroviry)

## 6 Oplachování zubní soupravy



Při opětovném uvedení do provozu odsajte 2 litry vody

DÜRR  
DENTAL  
THE BEST, BY DESIGN

# Týdenní čištění pomocí přípravku MD 555 cleaner

MD 555 cleaner je váš speciální čisticí prostředek pro odsávací zařízení a odlučovače amalgámu. Disponuje silným čisticím účinkem vůči usazeninám a nánosům. Používá se 1 až 2x týdně (např. v úterý a ve čtvrtek), při vyšším zatížení denně přes polední pauzu.

Čisticí  
prostředek

## 1 Předběžné čištění




Odsajte 2 litry vody

## 2 Dávkování 5%



Příprava 5% roztoku:  
1 litr vody + 50 ml přípravku MD 555 cleaner

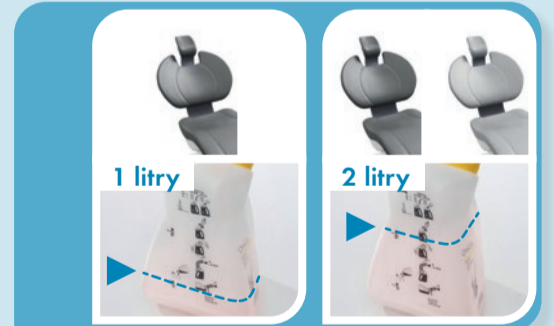

**Na zubní soupravu:**  
1 litr vody + 2,5 uzávěru (po rysku) přípravku MD 555 cleaner (50 ml)  
**Při 2 zubních soupravách:**  
2 litry vody + 5 uzávěrů (po rysku) přípravku MD 555 cleaner (100 ml)

## 3 Odsávání



Nasaďte odsávací hadice, odsajte 2 litry nebo 1 litr roztoku

## 4 Čištění plivátka



Minimálně 250 ml roztoku na plivátko

## 5 Doba působení



Působení 30 až 120 minut

## 6 Oplachování zubní soupravy



Při opětovném uvedení do provozu odsajte 2 litry vody

DÜRR  
DENTAL  
THE BEST, BY DESIGN